

NÁVOD NA POUŽITIE
KINEZIOLOGICKÁ TEJPOVACIA PÁSKA PILOTAPE SILK
PILO-9010
„ZDRAVOTNÍCKA POMÔČKA“



POZOR! Pred prvým použitím produktu si prečítajte návod na použitie.

Pri nákupe si prosím skontrolujte kompletnosť a kvalitu produktu. Akékoľvek námietky nahláste osobe, ktorá dokument vydáva. Pri nahlasovaní kvantitatívnych/kvalitatívnych reklamácií postupujte v súlade s ustanoveniami v záručnom liste, t.j. predložte doklad o kúpe a záručný list vyplnený predajcom.

I. POPIS PRODUKTU

Bavleno-hodvábná kinesiotalpingová páska pokrytá hypoalergénnym akrylovým príľnavým povlakom. Hrúbka a rozťažnosť tejpú sú podobné elasticite kože, čo uľahčuje celý rozsah pohybov. Ich úlohou je uľahčovať od bolesti, znižovať svalové napätie a podporovať obehový systém v liečebno-rehabilitačnom procese. Veľkosť: 5cm x 5m

II. VLASTNOSTI

- Bavleno-hodvábný, priedušný materiál
- Vode odolný
- Výborná príľnavosť
- Vlnitý príľnavý vzor zvyšuje liečivý účinok tejpovacej pásky
- Bez latexu

III. SPÔSOB POUŽITIA

- Pásku aplikujte aspoň 30 minút pred fyzickou aktivitou
- Vyhňte sa naťahovaniu koncov pásky
- Pred aplikáciou očistite a osušte pokožku
- Po nalepení pásku počúvajte, aby ste aktivovali lepidlo a zvýšili jeho príľnavosť
- Pre lepšiu príľnavosť odstráňte prebytočné chlpy z oblasti, kde bude páska aplikovaná
- Pásku neodtrhávajte, ale jemne rolujte v smere rastu chĺpkov
- Ak sa okraje odlupujú, môžete ich orezať

IV. ZLOŽENIE

96 % viskóza, 4 % elastan

VI. PODMIENKY POUŽÍVANIA

- Tento výrobok by sa mal používať len podľa pokynov lekára.
- Výrobok a jeho súčasti sa smú používať iba na určený účel.
- Pokožka v mieste použitia by mala byť čistá – nepoužívajte lekárske obklady s masťami alebo krémami počas nosenia výrobku, neaplikujte obklady bezprostredne pred nasadením.
- Produkt by mal aplikovať kvalifikovaný zdravotnícky personál.
- Akýkoľvek vážny incident týkajúci sa pomôcky sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

VII. URČENÝ ÚČEL











Produkt je možné použiť na:

- Opuch
- Degeneratívne ochorenia
- Poranenia kĺbov
- Nestabilita kĺbov
- Dysfunkcia obehového systému a lymfatického systému

VIII. KONTRAINDIKÁCIE

- narušenie kože v mieste aplikácie náplasti (napr. rany, infekcie, rôzne typy zápalových reakcií);
- aneurizmy;
- zhubné formy rakoviny (o krytí a metodike však v tomto prípade rozhoduje ošetrojúci lekár);
- nezrastené zlomeniny;
- akútna fáza reumatizmu;
- hlboká žilová trombóza;
- srdcové zlyhanie v štádiu III alebo IV podľa NYHA;
- cukrovka;
- psoriáza (len v postihnutej oblasti);
- kŕčové žily;
- čerstvé pooperačné jazvy.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

| | |
|---|---|
|  | Výrobca |
|  | Označenie CE |
|  | Referenčné číslo |
|  | Dátum výroby |
|  | Prečítajte si návod na použitie |
|  | Upozomenie |
|  | Číslo série |
|  | Týmto smerom v správnej polohe, neprevracajte |
|  | Uchovávať v suchu |
|  | Zdravotnícka pomôcka |



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko

tel.: +48 669 222 213; +48 605 499 599

e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Ver. 1.1

Vydané:



ZÁRUČNÝ LIST
KINEZIOLOGICKÁ TEJPOVACIA PÁSKA PILOTAPE SILK
PILO-9010

| Model: | Sériové číslo: | Dátum predaja: | Podpis a pečiatka predávajúceho: |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | |

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja, ku ktorému je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na výrobok sa vzťahuje 18-mesačná záručná doba od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovaným servisným technikom za predpokladu, že výrobok bol používaný na určený účel a v súlade s návodom na použitie.
5. Výmena bude vykonaná čo najskôr, maximálne však do 14 dní odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - poškodenie spôsobené používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie
7. Výmeny by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.o.
8. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
9. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
10. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.