

**NÁVOD NA POUŽITIE
REHABILITAČNÁ LOPTIČKA S
VÝBEŽKAMI
PILO-3006/-3007/-3008/-3009/-3010
„ZDRAVOTNÍCKA POMÔČKA“**



POZOR! Pred prvým použitím produktu si prečítajte návod na použitie..

Pri nákupe si prosím skontrolujte kompletnosť a kvalitu produktu. Akékoľvek námietky nahláste osobe, ktorá dokument vydáva. Pri nahlasovaní kvantitatívnych/kvalitatívnych reklamácií postupujte v súlade s ustanoveniami v záručnom liste, t.j. predložte doklad o kúpe a záručný list vyplnený predajcom.

I. POPIS PRODUKTU

Loptička s výbežkami je určená na rehabilitáciu, cvičenie rúk a nôh a masáž tela. Výbežky sú na celom povrchu, ktoré navyše stimulujú receptory na pokožke, zlepšujú prekrvenie a mikrocirkuláciu. Znižujú napätie, relaxujú svaly a uvoľňujú. Jeho špeciálne tvarovaný tvar zaisťuje lepšie prispôbenie sa telu.

II. VLASTNOSTI

Je vyrobený z kvalitného PVC materiálu, bez zápachu a je netoxický.
Dostupné veľkosti: 6, 7, 8, 9, 10 cm

III. SPÔSOB POUŽITIA

1. V sede alebo v stoji si vyzujte topánky a zľahka našliapnite nohou na loptu.
Rolujte loptičku tam a späť.
2. Pomocou lopty si sami masírujte svaly rúk a krku.



3. Otočte sa chrbtom k stene a umiestnite loptu medzi krk a lopatku. Jemne sa oprite o stenu a rolujte hore a dole alebo zo strany na stranu. Podržte na mieste, zatlačte a opakujte.



IV. ZLOŽENIE

polyvinylchlorid (PVC) 100%

V. PODMIENKY POUŽÍVANIA

- Výrobok a jeho súčasti sa smú používať iba na určený účel.
- Udržujte výrobok v čistote podľa odporúčaní uvedených v tomto návode. Nesprávne čistenie a údržba produktu môže viesť k jeho zničeniu.
- Výrobok nie je hračka. Vždy, keď deti používajú výrobok, je potrebný dozor dospelšej osoby.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Akýkoľvek vážny incident týkajúci sa pomôcky sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.





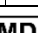
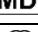




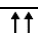
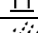

VI. KONTRAINDIKÁCIE

- Nepoužívať u pacientov so zmyslovými poruchami alebo u ľudí s kožnými léziami, ako sú vredy, pľuzgiere, odreniny atď.
- Pred použitím sa odporúča konzultácia s rehabilitačným asistentom alebo fyzioterapeutom.
- Výskyt bolesti počas cvičenia
- Zápal kĺbov a periartikulárnych tkanív
- Opuch
- Čerstvé pooperačné jazvy alebo iné rany

VII. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vyhňte sa vysokým teplotám
- Umyte teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky
- Nečistite agresívnymi chemickými prostriedkami
- Sušte v tieni a na vzdušnom mieste – nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu. Výrobok nie je tepelne odolný a pri vysokých teplotách stráca svoje vlastnosti.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Zdravotnícka pomôcka
	Prečítajte si návod na použitie
	Upozornenie
	Číslo série
	Týmto smerom v správnej polohe, neprevracat'
	Uchovávať v suchu
	Krehké, manipulujte opatrne
	Nestrihajte
	Obal je recyklovateľný



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko
tel.: +48 669 222 213; +48 605 499 599
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.1
Vydané:

ZÁRUČNÝ LIST
REHABILITAČNÁ LOPTIČKA S VÝBEŽKAMI
PILO-3006/-3007/-3008/-3009/-3010

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Výrobca ubezpečuje zákazníka, že predmet predaja, ku ktorému je vydaný tento záručný list, je úplne nový a vo vysokej kvalite.
2. Na výrobok sa vzťahuje 12-mesačná záručná doba od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste.
3. Základom pre posúdenie reklamácie je predloženie správne vyplneného záručného listu spolu s priloženým dokladom o kúpe.
4. Prípadné závady na zariadení odstráni REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovaný servisný technik za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho účelom a odporúčaniami uvedenými v návode na použitie.
5. Oprava/Výmena bude vykonaná čo najskôr, maximálne však do 14 dní odo dňa prevzatia zariadenia na servisnom mieste.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - činnosti súvisiace s údržbou, čistením a nastavovaním popruhu popísané v návode na použitie;
 - diely podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie popruhu, napr. nalomeniny, trhliny atď.;
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbalosťou, vykonávaním svojpomocných opráv, úprav alebo konštrukčných zmien.
7. Pred vrátením prístroja autorizovaným servisným technikom ho treba vyčistiť podľa návodu na použitie, aby bolo vhodné na servisnú kontrolu.
8. Opravy a výmeny by mali vykonávať autorizovaní servisní technici spoločnosti Reha Fund Sp. z o.o.
9. V prípade neoprávnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
10. Územný rozsah záručnej ochrany pokrýva územie Slovenskej republiky.
11. Záruka na predávaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.